



Sommario della pubblicazione

Rialzo del seno mascellare con tecnica S.A.S,

Operatore: Dr. Rivabella Flavio libero professionista in Roma

Scopo:

Riabilitazione di una paziente femmina di anni 68 che si presenta con la mancanza degli elementi 25/26, ed un osso residuo di circa 6mm in posizione 25 e circa 5mm in posizione 26. Si provvede ad eseguire un rialzo del seno mascellare per via crestale utilizzando la metodica S.A.S. che comporta minore morbilità, minor costo, minor tempo operatorio.

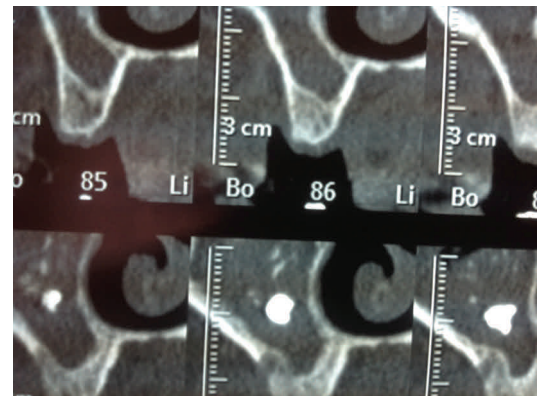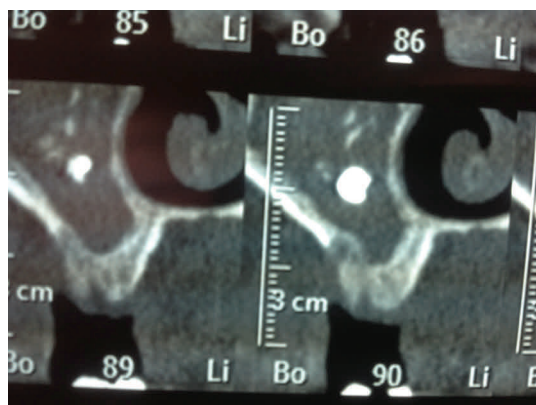

Metodi e materiali:

Il kit S.A.S. della Tiradix è composto di tre frese di diametro 2,9mm e stop con aumento della profondità di lavoro millimetro per millimetro.




Letteratura TiRADIX

Una volta aperta la corticale sinusale a 7mm a livello del 25 e 5mm a livello del 26, si inserisce mediante il compattatore con inserito lo stop di profondità dapprima del collagene e successivamente del Beta fosfato tricalcico multiporoso (Poresorb 06-1mm).



In contemporanea al rialzo vengono inseriti due impianti Tiradix: un Ø4x8mm e un Ø4,5x8mm.

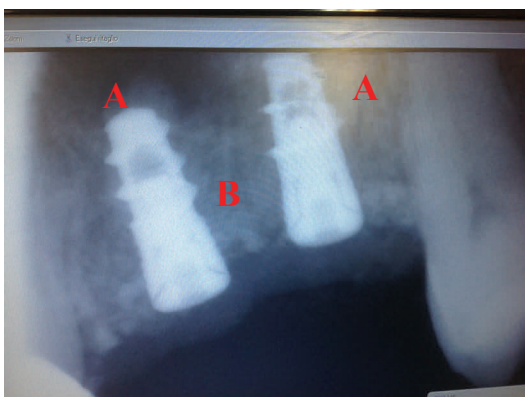

Nella endoorale eseguita al termine dell'intervento si possono apprezzare le due "cupole" di Poresorb (A) e la linea della corticale dell'osso nativo (B) e valutare l'entità del guadagno osseo.

Risultati:

A distanza di circa 6 mesi dall'intervento il beta fosfato tricalcico sarà sostituito da osso e questo permetterà di protesizzare gli impianti.

Conclusione:

Questa semplice e ripetibile metodica, permette di risolvere tutti i casi di riassorbimento osseo inseriti nella seconda classe secondo la classificazione di Cawood e Howell senza dover affrontare un sinus lifting con accesso vestibolare, soprattutto senza l'utilizzo di osteotomi come previsto della metodica di Summer.

La metodica S.A.S. consente maggiore predittibilità, sicurezza e ripetibilità per l'operatore, e minori disagi operatori e post operatori per il paziente.

TiRADIX

SEMPLICITÀ E SICUREZZA

TiRADIX Srl - Via Rovereto 1 - 20871 Vimercate (MB) Italy

tel +39 039 6612705 - fax + 39 039 6388468 - Email info@tiradix.it