


## Sommario della pubblicazione

### Risoluzione implantologica di paziente edentula eseguito durante i Corsi pratici di implantologia a Milano

Operatori: Dr. Rossi Enrico, Dr. Preda Gabriel, Dr. Leonardi Roberto

#### Scopo:

La paziente di anni 72 si presenta così alla nostra osservazione, edentula a del mascellare inferiore, edentula a del mascellare superiore con presenza di due impianti in zona frontale, e canino incluso. Mantenuti adeguati spessori verticali ed orizzontali.

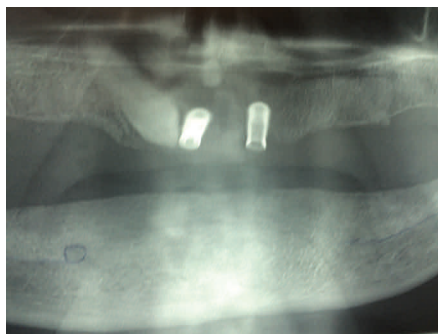

#### Metodi e materiali:

Si decide di suddividere la parte chirurgica in 5 sedute differite per ridurre lo stress chirurgico alla paziente.

La prima seduta prevede la soluzione Implantare del terzo quadrante.

La seconda seduta prevede la soluzione del quarto quadrante.

La terza seduta secondo quadrante, con rimozione dell'impianto in zona 22 e rigenerazione ossea del sito.


La quarta seduta primo quadrante.

Quinta seduta rimozione dell'impianto in zona 11 e del canino incluso con contemporanea rigenerazione ossea.

#### Risultati:


Posizionati 7 impianti nel mascellare

inferiore che dopo circa tre mesi verrà riabilitato con un circolare fisso.

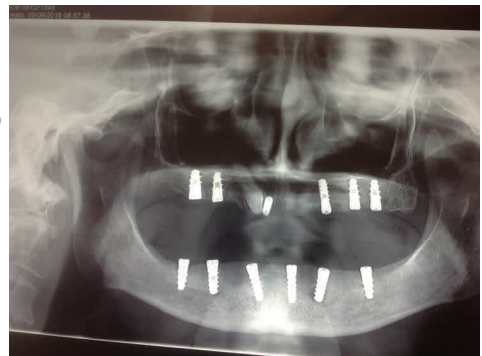

Posizionati 5 impianti nel mascellare superiore che verrà riabilitato dopo circa 4 mesi con un circolare fisso, tuttavia per avere una migliore predicibilità è un migliore equilibrio protesico, nelle prossime settimane verrà inserito un impianto nel primo quadrante, che verrà utilizzato una volta osteointegrato.

In seguito si è provveduto alla rimozione del canino incluso e dell'impianto adiacente posizionato in un'altra struttura.

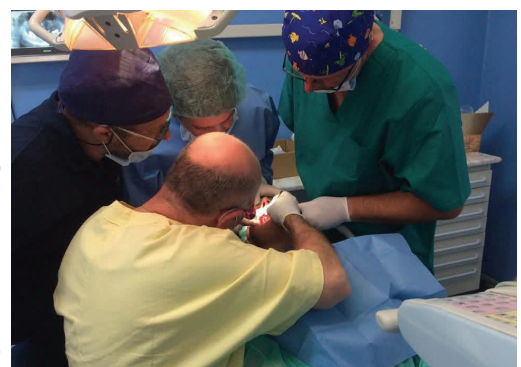

## Letteratura TiRADIX

### Conclusione:

La paziente sarà riabilitata inizialmente con due circolari provvisori in resina che saranno sostituiti dopo circa tre mesi da quelli definitivi in ceramica, garantendo una qualità di vita molto elevata.



# TiRADIX

SEMPLICITÀ E SICUREZZA

TiRADIX Srl - Via Rovereto 1 - 20871 Vimercate (MB) Italy  
tel +39 039 6612705 - fax + 39 039 6388468 - Email [info@tiradix.it](mailto:info@tiradix.it)