

## Sommario della pubblicazione

### Rialzo del seno mascellare con tecnica S.A.S,


Operatore: Dr. Laudadio Carlo libero professionista in Noicattaro (BA)

#### Scopo:


Riabilitazione di una paziente femmina di anni 56 che si presenta con la seguente situazione. Si prevede una soluzione protesica fissa sull'arcata superiore e riabilitazione protesica sull'arcata inferiore.



A Livello del 25 l'altezza dell'osso residuo è di circa 6mm e spessore di 4,5mm.

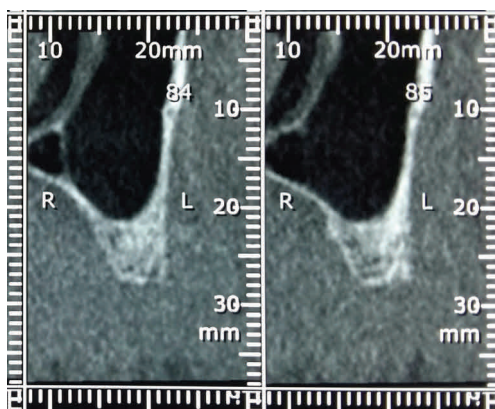

Si provvede ad eseguire un rialzo del seno mascellare per via crestale utilizzando la metodica S.A.S. che comporta minore morbilità, minor costo, minor tempo operatorio.

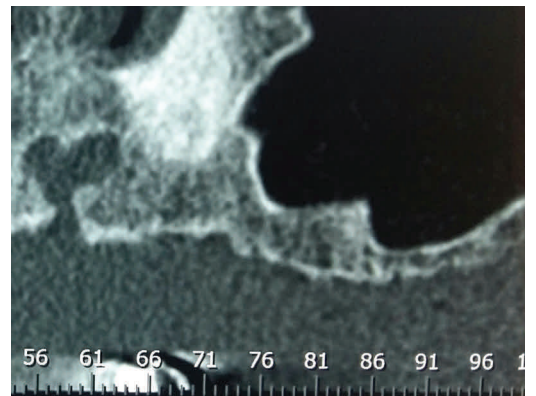

#### Metodi e materiali:

Il kit S.A.S. della Tiradix è composto di tre frese di diametro 2,9mm e stop con aumento della profondità di lavoro millimetro per millimetro.



## Letteratura TiRADIX

Una volta aperta la corticale sinusale a 8mm a livello del 25, si inserisce mediante il compattatore con inserito lo stop di profondità di 6mm dapprima del collagene e successivamente del materiale da riempimento.



In contemporanea al rialzo viene inserito un impianto Tiradix Ø3,3x12mm.

Nella endoorale eseguita al termine dell'intervento si può apprezzare la "cupola" del materiale da rigenerazione 4mm oltre la linea della corticale dell'osso nativo.


### Risultati:

A distanza di circa 6 mesi dall'intervento il materiale da rigenerazione sarà sostituito da osso e questo permetterà di protesizzare l'impianto.

### Conclusione:

Questa semplice e ripetibile metodica, permette di risolvere tutti i casi di riassorbimento osseo inseriti nella seconda classe della classificazione di Cawood e Howell evitando sia l'intervento di Sinus Lifting con accesso vestibolare, sia la metodica di Summer con osteotomi e martello, tecniche valide ma con sicuramente maggiore morbilità per il paziente.

La metodica S.A.S. consente maggiore predittibilità, sicurezza e ripetibilità per l'operatore, e minori disagi operatori e post operatori per il paziente.

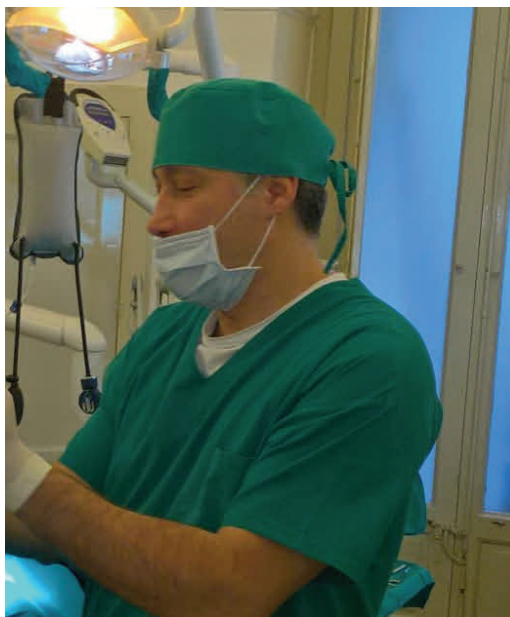

# TiRADIX

SEMPLICITÀ E SICUREZZA

TiRADIX Srl - Via Rovereto 1 - 20871 Vimercate (MB) Italy

tel +39 039 6612705 - fax + 39 039 6388468 - Email info@tiradix.it