

Sommario della pubblicazione


Riabilitazione fissa su impianti

Operatore: Dr. Rivabella Flavio libero professionista in Roma
In collaborazione con il laboratorio odontotecnico Dental Life di Roma

Scopo:

Riabilitazione fissa su impianti in un uomo di 63 anni che si presentava all'osservazione con quattro elementi residui nell'arcata inferiore.

in zona 45 impianto Tiradix Ø 4,5 X 10mm , in zona 46 impianto Tiradix Ø 4,5 X 8mm , in zona 35 impianto Tiradix Ø 4 X 10mm , in zona 36 impianto Tiradix Ø 4,5 X 8mm.

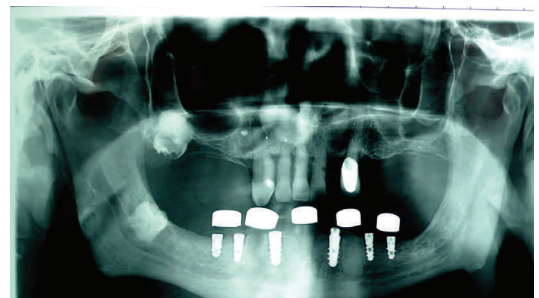


Metodi e materiali:

Dopo un accurata valutazione si decide di eseguire in un'unica seduta le avulsioni degli elementi residui e contemporanea inserzione di sei impianti di cui due post estrattivi immediati.

Risultati:


A distanza di 70gg si provvede alla riapertura degli impianti, presa dell'impronta e creazione del modello in gesso

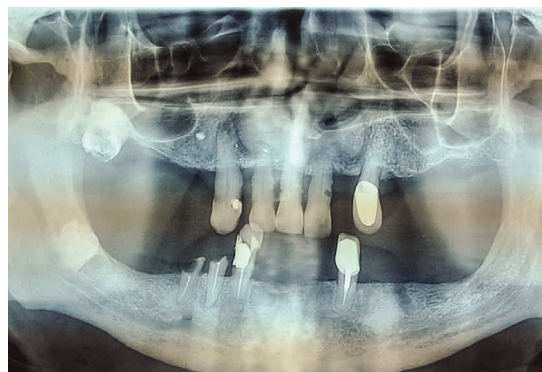


Sono stati utilizzati i seguenti impianti: per i post estrattivi in zona 33 e 43 impianti Tiradix Ø 5,5 X 12mm ,

Letteratura TiRADIX

Quindi si procede alla parallelizzazione dei monconi

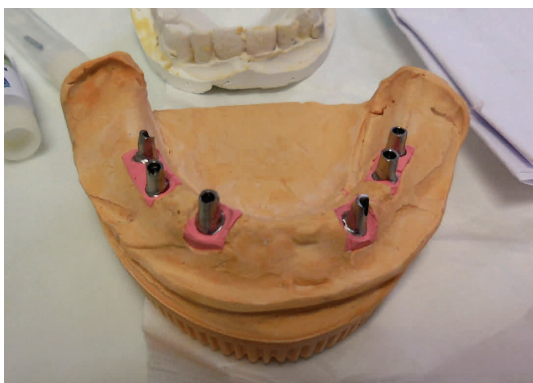

Ed in fine si provvede a montare la protesi al paziente

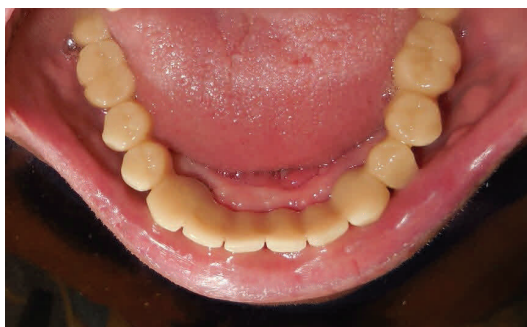

E successiva prova monconi sul paziente



Con l'inserzione di 6 impianti di cui 2 post estrattivi immediati, eseguiti in un'unica seduta chirurgica ha ottenuto una riabilitazione implantoprotesica fissa garantendo al paziente un confort e un'estetica assolutamente eccellenti.

Conclusione:

Viene creato un lavoro provvisorio



TiRADIX

SEMPLICITÀ E SICUREZZA

TiRADIX Srl - Via Rovereto 1 - 20871 Vimercate (MB) Italy
tel +39 039 6612705 - fax + 39 039 6388468 - Email info@tiradix.it