


Sommario della pubblicazione

Riabilitazione dell'arcata superiore mediante posizionamento di 5 Impianti - Tecnica Proxi

Operatore: Dr. Mariani Attilio libero professionista in Livorno(LI)
Presso la Cooperativa Odontoiatrica IL SORRISO

Scopo:

Il paziente Maschio di anni 61 si presenta con una parodontopatia grave e notevole mobilità degli elementi dentali. Si decide di estrarre gli elementi dentali residui e posizionare 5 impianti sull'arcata superiore per permettere il posizionamento di una protesi avvitata.

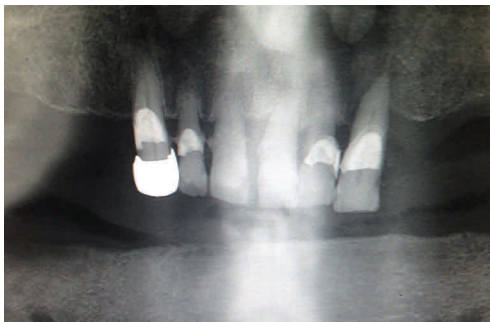

Metodi e materiali:


Apertura del lembo a tutto spessore e inserimento di impianti Tiradix.

Si scelgono impianti di diametro 3,75 di lunghezze varie.

A distanza di tre mesi dal posizionamento si provvede al posizionamento di viti transmucose.



Si sviluppa un modello in gesso dove si posizionano le basette Proxi e si crea una protesi avvitata con i monconi Proxi.

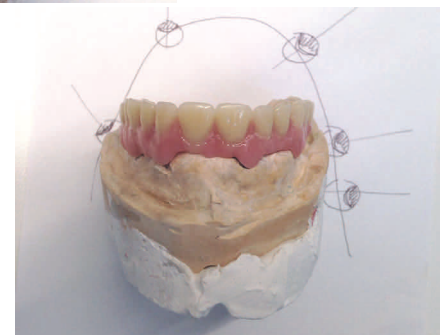

Letteratura TiRADIX

Si montano le basi Proxi sulle fixtures.



Si avvita la protesi del paziente e si controlla accuratamente la masticazione.




Conclusione:

Grazie alla tecnica implantare si ottiene la restituito ad integrum della capacità masticatoria, di una gradevole estetica con ottimo confort per il paziente

Risultati:

L' estetica e la funzionalità sono garantiti per il paziente.

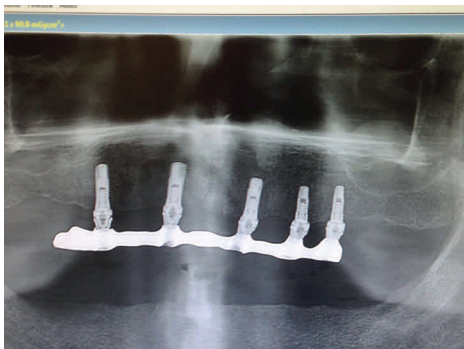

TiRADIX

SEMPLICITÀ E SICUREZZA

TiRADIX Srl - Via Rovereto 1 - 20871 Vimercate (MB) Italy
tel +39 039 6612705 - fax + 39 039 6388468 - Email info@tiradix.it