

Sommario della pubblicazione

**Riabilitazione a Carico Immediato su impianti,**

Operatore: Dr. Nicastro Massimiliano Libero Professionista in Firenze

**Scopo:**

Il paziente maschio di anni 70 si presenta alla nostra osservazione con una edentulia totale superiore ma con conservazione ossea verticale ed orizzontale.

Il paziente richiede una riabilitazione fissa su impianti.



La scelta di questi impianti è dovuta alla geometria delle fixtures che presentano superficie in SLA e una spira particolarmente aggressiva per garantire una ottima stabilità primaria.



**Metodi e materiali:**

Si decide di inserire 6 impianti due di lunghezza 17mm e diametro 4,5 lateralmente e 4 impianti di lunghezza 14 e diametro 4,5.

Si provvede ad inserire le basi Proxi due da 35\*, due da 17\* e due dritte e posizionamento dei monconi Proxi.



Si ricavano sulla protesi mobile costruita per l'occasione gli alloggiamenti per i monconi Proxi che vengono bloccati con resina a freddo e inviati al laboratorio

### **Risultati:**

Il giorno seguente abbiamo riconvocato il paziente e posizionata la protesi provvisoria.



Si posizionano le cappette Proxi sulle basi e si licenzia il paziente.



### **Conclusione:**

Questa tecnica permette di garantire al paziente notevole comfort e una soluzione estetica eccellente.

La scelta di fixtures particolarmente aggressive garantiscono grande stabilità primaria e permettono la risoluzione con carico immediato.

A distanza di 6/8 mesi dopo valutazione clinica e radiografica si provvederà alla sostituzione dei monconi e della protesi con una definitiva.

# TiRADIX

SEMPLICITÀ E SICUREZZA

TiRADIX Srl - Via Rovereto 1 - 20871 Vimercate (MB) Italy

tel +39 039 6612705 - fax + 39 039 6388468 - Email info@tiradix.it