


NEW

S.A.S. PRO

Sinus Lifting Mini Invasivo Transcrestale

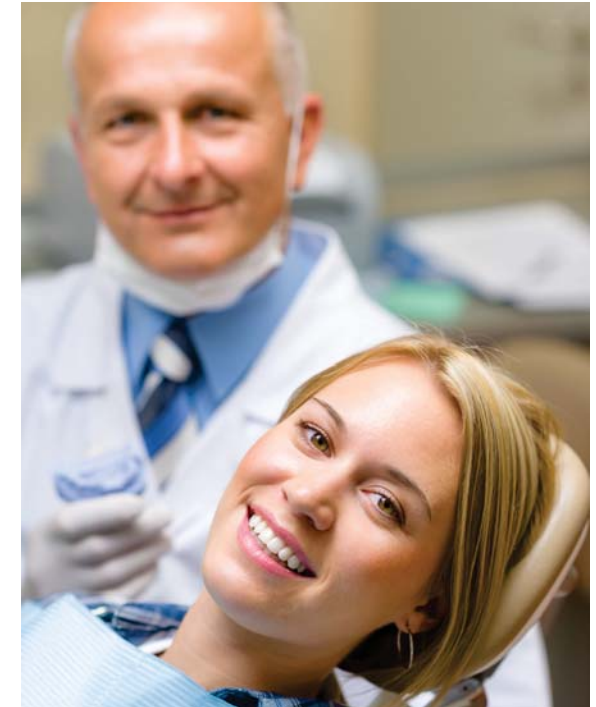

Semplice Sicuro Ripetibile



TIRADIX S.r.l.

Via Rovereto , 1

20871 Vimercate (MB)

tel 039 6612705 fax 039 6388468

info@tiradix.it www.tiradix.it

TIRADIX
SEMPLICITÀ E SICUREZZA

LA METODICA

Preparazione
Alveolo



Riempimento
Materiale



Inserimento
Impianto



Paziente dopo
7gg dall'Intervento




Il Kit S.A.S. è costituito dalla fresa pilota \varnothing 2mm e da 3 frese \varnothing 2,9mm appositamente studiate per forare la corticale sinusale ed elevare la membrana Schneideriana senza lederla.

Si è scelto il \varnothing 2,9mm in quanto, per la sua naturale conformazione, il tessuto osseo del mascellare superiore è solitamente poco consistente pertanto si ottiene una migliore stabilità primaria preparando un alveolo chirurgico sottodimensionato. Gli Stop di profondità vanno da 3mm a 14mm con la progressione di 1mm. Sono studiati per essere inseriti direttamente dalla punta della fresa per rendere la loro sostituzione rapida e sicura.

Partono da 3mm ma non è sempre possibile ottenere una adeguata stabilità primaria con un osso residuo inferiore a 5mm, pertanto, senza questa condizione iniziale non è garantito il contemporaneo inserimento dell'implanto.


Negli anni sono stati trattati migliaia di casi con contemporaneo inserimento di impianti di diversi diametri dal \varnothing 3,3mm al \varnothing 5mm di qualsiasi casa implantare.

Rispettando i passaggi gradualmente della tecnica il risultato è garantito.

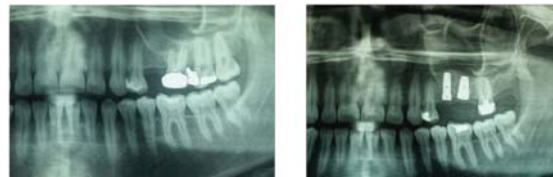

Lo scopo della Metodica S.A.S. consiste nella graduale elevazione del pavimento del Seno Mascellare per oltre 5mm rispetto alla situazione iniziale con contemporaneo inserimento dell'Implanto.

Gli Stop di profondità, facili da assemblare, senza rimuovere la fresa dal Manipolo, rendono questa tecnica facile sicura e rapida.

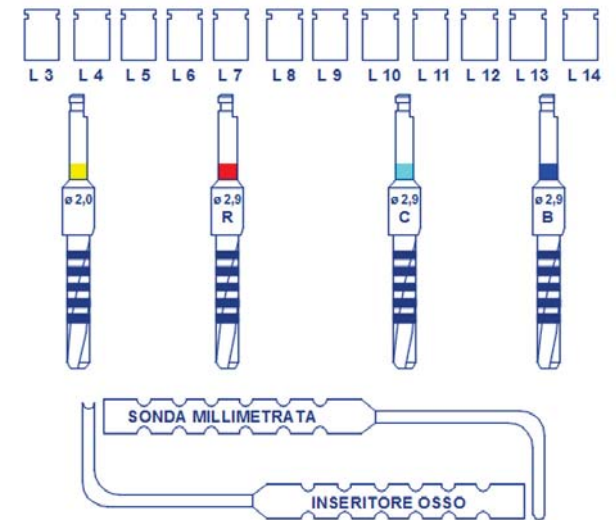

IL KIT COMPRENDE

- * 4 FRESE
- * 12 STOP DI PROFONDITA'
- * 1 SONDA MILLIMETRATA
- * 1 COMPATTATORE PER L'OSSO
- * 1 BOX AUTOCLAVABILE