

## Sommario della pubblicazione



### Sinus Lifting Transcrestale Mini Invasivo Tecnica S.A.S Pro

Operatore: Dr. Chirulli Alessio libero professionista in Ceglie Messapica

#### Scopo:

Riabilitazione di una paziente di 42 anni non fumatrice, che si presenta con la mancanza di un elemento nel mascellare, ed un osso residuo di 5,5 mm. Si provvede ad eseguire un rialzo del seno mascellare per via crestale utilizzando la metodica S.A.S. che comporta minore morbilità, minor costo, minor tempo operatorio.

In contemporanea al rialzo viene inserito un impianto Ø 4,75 X 11mm.

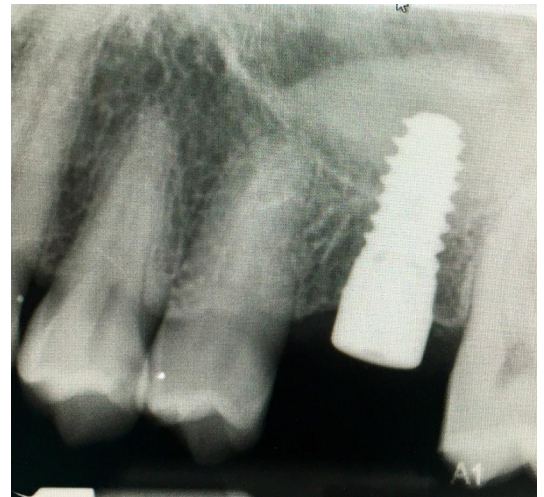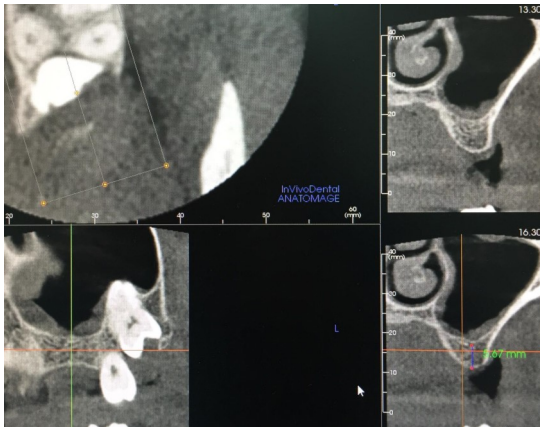

Nella endoorale eseguita al termine dell'intervento si può apprezzare la "cupola" del sostituto osseo e valutare l'entità del guadagno ottenuto.

#### Metodi e materiali:


Il kit S.A.S. Pro della Tiradix è composto dalla fresa Pilota Ø 2mm e da tre frese di diametro 2,9mm appositamente studiate per forare la corticale superiore e sollevare la membrana Schneideriana senza lederla.

Una volta aperta la corticale sinusale a 5,67 mm, si inserisce mediante il compattatore con inserito lo stop di profondità dapprima del collagene e successivamente gel40 Osteobiol



### Risultati:

A distanza di 2 giorni viene eseguita una Tac di controllo dove si può apprezzare la riuscita dell'intervento, con un incremento osseo di 7,61mm.

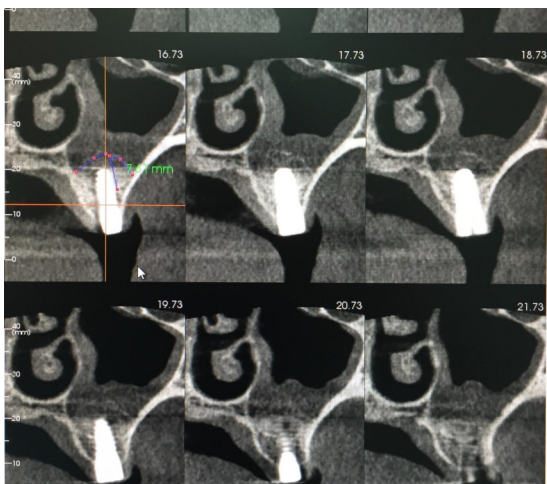

### Conclusione:

Questa semplice e ripetibile metodica, permette di risolvere tutti i casi di riassorbimento osseo inseriti nella seconda classe secondo la classificazione di Cawood e Howell senza dover affrontare un sinus lifting con accesso vestibolare, soprattutto senza l'utilizzo di osteotomi come previsto della metodica di Summer.

La metodica S.A.S. Pro consente maggiore predittibilità, sicurezza e ripetibilità per l'operatore, e minori disagi operatori e post operatori per il paziente.

**TiRADIX**  
SEMPLICITÀ E SICUREZZA

TiRADIX Srl - Via Rovereto 1 - 20871 Vimercate (MB) Italy  
tel +39 039 6612705 - fax + 39 039 6388468 - Email [info@tiradix.it](mailto:info@tiradix.it)