

Sommario della pubblicazione

Riabilitazione Implantoprotesica Totale

Operatore: Dr. Corbi Sergio Responsabile della chirurgia presso gli studi dentistici Il Sorriso, Livorno – Follonica – San Miniato

Scopo:

Il paziente maschio di anni 72 si presenta alla nostra osservazione con edentulia totale superiore ed inferiore. Il paziente richiede una riabilitazione fissa su impianti.

Metodi e materiali:

Si decide di inserire 3 impianti in zona 14, 12 e 24 del diametro 4,5 e lunghezza di 12mm, e 1 impianti in zona 22 del diametro 3,3 e lunghezza di 12mm dovuta allo spessore limitato dell'osso.

Nei quadranti inferiori sono stati inseriti impianti del diametro 3,3 in zona 34, 31, 41, 43 e un impianto 4,5 in zona 32. Gli impianti inferiori sono stati inseriti da circa 30 giorni e verranno protesizzazione successivamente.

La scelta di questi impianti è dovuta alla geometria delle fixtures che presentano superficie in SLA e autofiletanti per permettere di avere una ottima stabilità primaria.

Risultati:

Una volta trascorsi circa 4 mesi dal posizionamento degli impianti si provvede alla protesizzazione.

Vengono inseriti i monconi prescelti per ottenere la protesizzazione.

Si controlla radiograficamente la perfetta inserzione dei monconi che vengono stretti con chiave dinamometrica a 30N.



Il laboratorio odontotecnico provvede a realizzare una protesi fissa avvitata.



Conclusioni:

Questa tecnica eseguita a cielo aperto dopo accurato studio della anatomia ossea permette di posizionare in maniera ottimale le fixture.

La scelta di fixtures particolarmente aggressive garantiscono grande stabilità primaria.

Letteratura TiRADIX

A distanza di circa 4 mesi dopo valutazione clinica e radiografica si provvede al posizionamento della protesi superiore.



TiRADIX
SEMPLICITÀ E SICUREZZA

TiRADIX Srl - Via Rovereto 1 - 20871 Vimercate (MB) Italy
tel +39 039 6612705 - fax + 39 039 6388468 - Email info@tiradix.it