



TIRADIX SRL

PROCEDURA CHIRURGICA

MINI SHORT IPV Ø 4,75 mm

PASSARE FRESA A LANCIA Ø 2,5
PASSARE FRESA Ø 3.2 FINO A PROFONDITA' UTILE UTILIZZANDO GLI STOP
PASSARE FRESA Ø 4 FINO A PROFONDITA' UTILE UTILIZZANDO GLI STOP
INSERIRE L'IMPIANTO UTILIZZANDO IL POSIZIONATORE
PRESENTE NELLA CONFEZIONE ED AVVITARE CON IL
CRICCHETTO E LE PROLUNGHE

MINI SHORT IPV Ø 4,75 mm

PASSARE FRESA A LANCIA Ø 2,5
PASSARE FRESA Ø 3.2 FINO A PROFONDITA' UTILE UTILIZZANDO GLI STOP
PASSARE FRESA Ø 4 FINO A PROFONDITA' UTILE UTILIZZANDO GLI STOP
PASSARE FRESA Ø 4,5 FINO A PROFONDITA' UTILE UTILIZZANDO GLI STOP
INSERIRE L'IMPIANTO UTILIZZANDO IL POSIZIONATORE
PRESENTE NELLA CONFEZIONE ED AVVITARE CON IL
CRICCHETTO E LE PROLUNGHE



**LE PRESENTI ISTRUZIONI NON DEVONO RITENERSI
ESAUSTIVE PER UN CORRETTO UTILIZZO DEL
DISPOSITIVO.**

**PER UN CORRETTO APPROCCIO ALLA METODICA
IN MERITO A :**

- 1 - SELEZIONE DEL PAZIENTE
- 2 - TECNICA CHIRURGICA
- 3 - POSSIBILI CAUSE DI INSUCCESSO

**E' FATTO OBBLIGO DI CONSULTARE IL MANUALE
DELL' OPERATORE E IL MANUALE DEL PAZIENTE
CHE VENGONO DISTRIBUITI GRATUITAMENTE ALL'ATTO
DEL PRIMO ACQUISTO.**

**QUALORA NE SIATE SPROVVISTI RICHIEDETELI A
Tiradix Srl - TEL. +39 039 6612705 - FAX +39 039 6388468
E-MAIL info@tiradix.it**

**OPPURE SCARICATELI DIRETTAMENTE DAL SITO
www.tiradix.it NELLA SEZIONE MANUALI**

Via Rovereto, 1 - 20871 Vimercate (MB) Italy

Tel. +39 039 6612705 Fax +39 039 6388468 E-mail: info@tiradix.it - www.tiradix.it



TIRADIX SRL

SURGICAL TECHNIQUE

MINI SHORT IPV Ø 4,75 mm

ACTION START BURR Ø 2.5
ACTION BURR Ø 3.2 FOR A USEFUL DEPTH
ACTION BURR Ø 4.0 FOR A USEFUL DEPTH
INSERT THE IMPLANT USING THE MOUNT INCLUDED
SCREW WITH THE SCREWER JACK AND THE EXTENSIONS

MINI SHORT IPV Ø 4,75 mm

ACTION START BURR Ø 2.5
ACTION BURR Ø 3.2 FOR A USEFUL DEPTH
ACTION BURR Ø 4.0 FOR A USEFUL DEPTH
ACTION BURR Ø 4.5 FOR A USEFUL DEPTH
INSERT THE IMPLANT USING THE MOUNT INCLUDED
SCREW WITH THE SCREWER JACK AND THE EXTENSIONS



**THESE INSTRUCTIONS MUST NOT BE CONSIDERED
AS BEING COMPLETE IN ORDER TO USE THE DEVICE
CORRECTLY.**

**FOR A CORRECT APPROACH TO THE METHOD
CONCERNING :**

- 1 - SELECTION OF THE PATIENT**
- 2 - SURGICAL TECHNIQUE**
- 3 - POSSIBLE CAUSES OF FAILURE**

**THE OPERATOR MANUAL AND THE PATIENT'S MANUAL
MUST BE CONSULTED**

**THESE ARE DISTRIBUTED FREE OF CHARGE WITH
THE FIRST PURCHASE.**

**IF YOU DO NOT HAVE ONE OF THESE, ASK TIRADIX
TO SEND IT TO YOU**

TEL. +39 039 6612705 - FAX +39 039 6388468

E-MAIL info@tiradix.it

**OR DOWNLOAD THEM DIRECTLY FROM THE WEB-SITE
www.tiradix.it IN THE MANUALS SECTION**

Via Rovereto, 1 - 20871 Vimercate (MB) Italy

Tel. +39 039 6612705 Fax +39 039 6388468 E-mail: info@tiradix.it - www.tiradix.it