

TiRADIX

SEMPLICITÀ E SICUREZZA

USO E MANUTENZIONE Tray

Manutenzione e pulizia

I box di sterilizzazione devono essere puliti prima di ogni utilizzo.

Utilizzare sempre detergenti neutri anche se la pulizia avviene mediante apparecchi ad ultrasuoni. Asciugare i box con un panno morbido. Non utilizzare spugne con parti metalliche o abrasive che potrebbero danneggiare le superfici.

AVVERTENZE

I box vengono forniti in condizioni di NON sterilità quindi l'utilizzatore dovrà provvedere alla sterilizzazione prima dell'utilizzo.

Prima della sterilizzazione è necessario assicurarsi che siano stati ripuliti, in tutte le loro parti, da residui contaminanti.

Modalità di sterilizzazione

I materiali utilizzati per la produzione dei box possono sopportare un alto numero di cicli di sterilizzazione.

L'utilizzatore deve rispettare i parametri definiti per i principali cicli standard di sterilizzazione in autoclave senza superare i valori massimi previsti:

- **Tempo max 20 minuti**
- **Temperatura max 135°**
- **Pressione max 2.2 bar**

Conservazione

Il materiale può cambiare tonalità di colore se esposto ai raggi UV per lunghi periodi. Conservare i Tray al buio quando non utilizzati.