Sommario della pubblicazione

Riabilitazione in posizione 25 e 26 con GRB

Operatore: Dr. Ho Vinh Xuan libero professionista in Formello (RM)

Scopo:

Il Paziente di anni 56 si presenta alla nostra osservazione con perdita degli elementi 25 e 26. Si esegue rx.



Dalle immagini non risulta alcuna anomalia. Si posizioneranno due impianti nelle sedi 25 e 26.



Si apre un lembo chirurgico a tutto spessore che evidenzia una perdita importante di osso a livello vestibola- Si esegue rigenerazione ossea con re.


Metodi e materiali:

Si esegue una accurata pulizia della lesione avendo cura a mantenere intatto il ponte osseo che permetterà l'inserimento corretto e soprattutto avrà effetto tenda per la contemporanea ricostruzione ossea

Si esegue l'alveolo chirurgico mediante il Kit della Tiradix e si posizionano due impianti 4,5/10 e 4,5/12 nei siti preparati.



Si evidenziano alcune spire dell impianto scoperte.

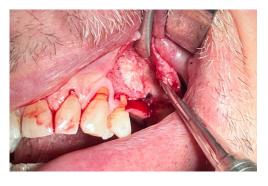

Gen oss e membrana in pericardio bovino TUTOPACH.

Letteratura TiRADIX

Risultati:

Gli impianti posizionati presentano una ottima stabilita primaria, nonostante la presenza di spire esposte.



Conclusione:

La protesizzazione vista l' importante rigenerazione avverrà dopo circa 6 mesi e con valutazione dell' avvenuta rigenerazione.



TiRADIX Srl - Via Rovereto 1 - 20871 Vimercate (MB) Italy tel +39 039 6612705 - fax + 39 039 6388468 - Email info@tiradix.it